

# Cicatridina®

sprej



**Dr. Gorkič**

**SESTAVA:** aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, natrijeva sol hialuronske kisline, butan, izobutan, propan.

**INDIKACIJE:** dopolnilno zdravljenje pri celjenju površinskih in globokih ran (odrgnine, raztrganine, opekline, kirurške rane, preležanine in razjede).

**NAVODILO ZA UPORABO:** priporočljivo je, da pred vsakim nanosom izdelka skrbno očistite predel kože, ki ga želite oskrbeti. ● **Za boljše mešanje prahu pred vsako uporabo vsebnik dobro pretresite, dokler ne zaslišite zvoka kroglic v notranjosti.** Med pršenjem držite vsebnik v pokončnem položaju na razdalji 10 do 15 cm, da zagotovite neposreden nanos na predel kože, ki ga želite oskrbeti. Postopek ponovite 2- do 3-krat na dan.

**NEŽELENI UČINKI:** uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru ali če opazite katerikoli drug neželeni učinek, prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji.

**KONTRAINDIKACIJE:** znana preobčutljivost za sestavine izdelka.



125 ml e

175 3

**PREVIDNOSTNI UKREPI: Opozorilo.** Vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preklanjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Ne zaužijte.

Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na dnu vsebnika, oziroma če je vsebnik odprt ali poškodovan.

**MEDICINSKI PRIPOMOČEK**

**CE 0373**



Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l. – Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA (ITALY)

Distributer: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 LOGATEC, SLOVENIJA

LOT :



EXP: ↓



8